

# ポケキャッチの使用法

**1** ポケキャッチのセット内容を確認してください。

 警告サインカード	 吸水シート	 収集板
 ニトリルグローブ	 グローブ	 シューズカバー
 ワイブシート	 拭き取りシート	 ケモジッパー(大)

**2** 汚染範囲の四隅に、警告サインカードを置きます。  
※グローブはニトリルグローブ→グローブの順で、二重に装着してください。



**3** 吸水シートと収集板で汚物を挟み込み、その都度、1枚目のケモジッパーに捨て、最後に上側のグローブも捨ててください。



**4** ワイブシートで汚染範囲をキレイに拭き取ってください。



**5** そのまま1分間以上放置して乾かしてください。その後、濡れている場所があれば拭き取りシートで乾拭きしてください。



**6** 完全に乾いたら、1枚目のケモジッパーを密閉した上で2枚目のケモジッパーに入れ、再度密閉してから捨ててください。

